



Pålidelig teknologi sender alarm til dig inden folingen

Når et føl er i vente, så ved du måske, hvor nervepirrende ventetiden kan være. Det er vigtigt at være til stede ved folingen, så du kan sikre dig at alt er i orden og har mulighed for at hjælpe ved komplikationer. Podas folealarm sender dig en besked lige inden folingen, så du kan nå frem i tide.

Reagerer på hestens adfærd - ikke sved

Podas Folealarm virker ved, at sensoren i bæltet omkring hoppen reagerer på hestens adfærd lige inden folingen. Studier af hestens natur har vist, at adfærdsmønsteret er utrolig forudsigeligt.

Derfor er denne teknologi yderst pålidelig, i modsætning til tidligere tiders folealarmer, der forsøgte at reagere på svedafsondring.

Folealarmen fås i flere forskellige udgaver. Hvis der er dårlig mobildækning kan du vælge modellen med radiotransmission som leveres med en særlig radiomodtager.

Folealarmen til mobiltelefon fås i både Classic, Lite og Premium udgaver. Premium- og Lite udgaverne kan desuden leveres uden gjord.

Folealarm Lite 2.0 t. mobil, uden gjord, til montering i grime, varenr. 13977

Classic Folealarm m/radio, komplet, inkl. modtager, varenr. 13970

Classic Folealarm t. mobil, komplet med gjord, varenr. 13973

Premium Folealarm t. mobil, komplet med gjord, varenr. 13972

Premium Folealarm t. mobil, uden gjord, til montering i grime, varenr. 139722

NORMAL INDSTILLING

For hopper, der hviler normalt. Når presseveerne begynder, lægger hoppen sig fladt på siden for at presse optimalt. Folealarmen registrerer dette og alarmen aktiveres efter 7,6 sekunder. Én pressevé varer minimum 7 sekunder.

1



Hoppen skal fole

2



Hun lægger sig på siden

3



Folealarmen måler tiden.

4



Alarmen går efter 7,6 sek.

5

Du kommer til hoppen i god tid til at overvære folingen og til at gøre det, der måtte være nødvendigt.

6



Føllet plejes

SPECIEL INDSTILLING

Anvendes til hopper, der normalt hviler på siden. Her er to situationer mulige, når hun lægger sig på siden: enten hviler hoppen, eller også foler hun.

Sådan fungerer FOLEALARMEN her:

1



Hoppen skal fole

2



Hun lægger sig på siden

3



Folealarmen måler tiden. Går der over 3 minutter hviler hun sig, idet en pressevé højst varer 2,5 min. Går der mere end 7,6 sek. og mindre end 3 minutter til hun rejser sig igen, går alarmen.

4



Alarmen går!

5

Du kommer til hoppen i god tid til at overvære folingen og til at gøre det, der måtte være nødvendigt.

6



Føllet plejes

FOLEALARMEN består af:

Holder og gjord, så den kan sættes på hoppen, samt senderen, der sender signalet (bill. 1).

Derudover en radiomodtager, hvis du vælger Folealarm med radio-transmission (Bill. 2). Vælger du en af mobiludgaverne skal du blot have en mobiltelefon.

1



2



FOLEALARMEN

Sidder godt på hesten. Den solide gjord ses tydeligt. Den generer ikke hesten unødvendigt. Kort sagt:

Sikkert, trygt og komfortabelt!

